


PROCEDIMIENTO TAC GUÍAS QUIRÚRGICAS CIGOMAS

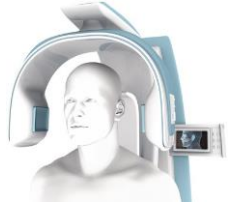

Procedimiento TC Simple (planificación solo hueso)

- Hacer un TC del paciente sin férula y sin sus prótesis (esqueléticos, completa, etc.).
- Los maxilares NO deben tener oclusión utilizar por ejemplo algodones.



Procedimiento TC Doble (planificación protésica)

TC1

- Hacer un TC del paciente con la férula radiográfica colocada en el maxilar correspondiente (la propia completa del paciente o un duplicado de acrílico).
- El paciente tiene que morder un índice de mordida, algodones o cera.

TC2


- TC de la férula radiográfica (SIN el índice radiográfico). Utilizar como base un trozo de espuma, Porexpan, caja de cartón, etc. (material que sea translúcido). La guía tiene que estar en una posición parecida a la que estaba en boca.
- Para el TC de la férula, utilizar los mismos parámetros del escáner empleados en el anterior TC del paciente.



Parámetros TC

- Cortes: Axiales.
- Área: Hasta la mitad de la órbita.
- Espesor y espaciado máximo de corte: 1 mm
- Inclinación del Gantry: 0° Filtro óseo y de tejido blando

Guía radiográfica

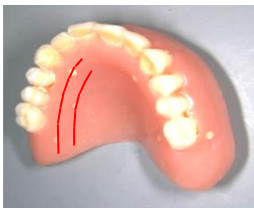

- 9-12 agujeros realizados con una fresa de Ø1,5mm y 1mm de profundidad.
- 6 lingual y 6 vestibular, molar, premolar y canino (aunque otra opción es correcta).
- Colocar los agujeros en diversos planos a diferentes niveles en relación al plano oclusal.
- Rellenar los agujeros con gutta-percha

- Colgar TC o el doble TC a

<https://www.kuneimplants.com/ipsouthern>

- En el apartado "mensaje" de wetransfer introducir el número de cliente suyo que Southern Implants le proporciona o en su defecto el nombre y apellido del profesional dental.

