

FLUJO TRABAJO IMPLANTES SUBPERIÓSTICOS

Ya dispone del encerado diagnóstico y pide a Southern Implants el provisional en PMMA

Verificación del encerado diagnóstico

Encerado baritado o con puntos de gutapercha.

- La clínica verifica el encerado diagnóstico.
- Revisa la oclusión.
- Verifica los criterios estéticos.



Tomografía computarizada - Doble TC

- La clínica realiza el TC Helicoidal (hospitalario) o Cone Beam (clínica).
- Activar filtro óseo (TC hospitalario).
- Las medidas del TC deben de ir como mínimo desde la parte superior de la orbita hasta la mandíbula.


Doble TC:

- 1º TC del paciente con el encerado diagnóstico en boca con un índice de mordida o algodones.
- 2º TC del encerado diagnóstico solo sin índice ni algodones.





Registro TC plataforma

- La clínica registra y sube a la plataforma:
 - Doble TC en formato Dicom.
 - STL de la prueba de dientes o encerado diagnóstico.

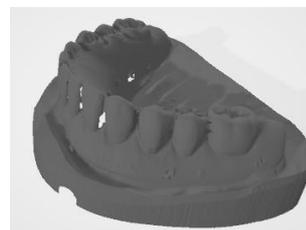

- STL de la encía.


- STL del antagonista.

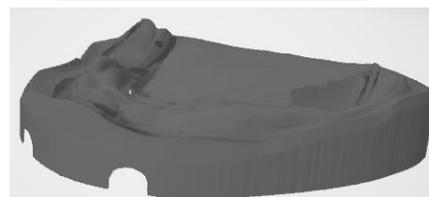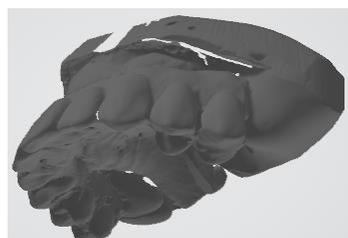

- STL de la mordida, si el antagonista no está relacionado o si es edéntulo es bimaxilar (es decir no hay ningún diente en boca para relacionar nada).

Diseño y fabricación de los implantes subperiósticos

- Kune Implants verificará y confirmará la calidad del TC.
- Diseñará la estructura de implantes subperiósticos con un plazo máximo de 15 días laborables coordinando con el cirujano una reunión para verificar la planificación.
- Una vez aprobada la planificación se inicia la fabricación de la estructura según la conexión de los implantes solicitada en el registro del tratamiento (Multi-unit o hexágono externo + pilares Multi-unit).
- La estructura de implantes será fabricada y mandada a la clínica.

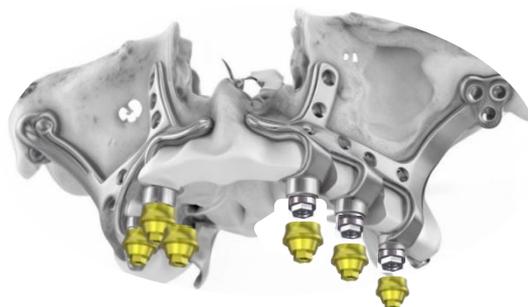

Fabricación del provisional en PMMA

- Southern Implants le realizará el provisional en PMMA según los archivos digitales registrados en la plataforma y lo mandará conjuntamente con las estructuras implantológica a la clínica.

Envío del material quirúrgico

Southern Implants le enviará todo el material quirúrgico necesario a la clínica.

- Tornillos de osteosíntesis, fresas y pilares Multi-units.
- Kit de cirugía.



Día de la cirugía

- Un asesor técnico de Southern Implants asistirá a la cirugía para dar soporte técnico y ayudar al equipo quirúrgico.

