



SOUTHERNIMPLANTS®

Innovative Treatment Solutions

FLUJO TRABAJO IMPLANTES SUBPERIÓSTICOS

Sin encerado diagnóstico

TC con abre bocas

- La clínica realiza el TC Helicoidal (hospitalario) o Cone Beam (Clínica).
- Activar filtro óseo (TC hospitalario).
- Las medidas del TC deben de ir como mínimo desde la parte superior de la orbita hasta la mandíbula.




Registro TC plataforma

- La clínica registra el tratamiento y sube el TC en la plataforma.



Diseño y fabricación de los implantes subperiósticos

- Kune Implants verificará y confirmará la calidad del TC.
- Diseñará la estructura de implantes subperiósticos con un plazo máximo de 15 días laborables coordinando con el cirujano una reunión para verificar la planificación.
- Una vez aprobada la planificación se inicia la fabricación de la estructura según la conexión de los implantes solicitada en el registro del tratamiento (Multi-unit o hexágono externo + pilares Multi-unit).
- La estructura de implantes será fabricada y mandada a la clínica.

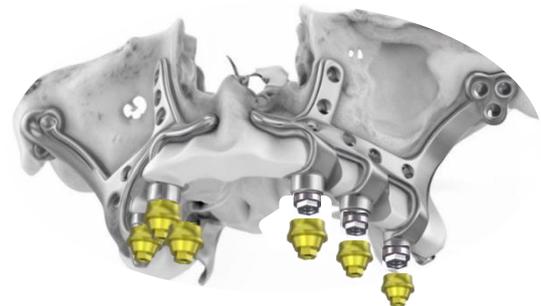

Envío del material quirúrgico

Southern Implants le enviará todo el material quirúrgico necesario a la clínica.

- Tornillos de osteosíntesis, fresas y pilares Multi-units.
- Kit de cirugía.



Día de la cirugía

- Southern Implants asistirá a la cirugía para dar soporte técnico.

!Atención!
El ingeniero no verá dientes ni
tejido blando y no podrá planificar
prostodónticamente

