

PROCEDIMIENTO TC TRATAMIENTO IMPLANTES SUBPERIÓSTICOS

El TC se puede realizar indiferentemente con un equipo Helicoidal (hospital) o Cone Beam (clínica).

Para poder realizar una correcta planificación de un tratamiento de implantes subperiósticos, los ingenieros necesitan ver la prótesis del paciente en el software de planificación, así como grosor de los tejidos, para asegurar unas cargas oclusales a los implantes y la visualización del grosor de los tejidos para planificar las conexiones subgingivales.

ARCADA COMPLETA SIN DIENTES



- TC del paciente sin prótesis.



- STL de la prótesis del paciente fuera de boca, oclusal y anatomía encía.



ARCADA COMPLETA SIN DIENTES - Opción abrebocas



- TC del paciente sin prótesis con un abrebocas.
Maxilar superior: Lengua situada en maxilar inferior y retraída.
Maxilar inferior: Lengua situada en maxilar superior y retraída.

TC del paciente sin prótesis con un abrebocas de ortodoncia.
Maxilar superior: Lengua en mandíbula y retraída.
Maxilar inferior: Lengua situada en mandíbula y retraída



ARCADA COMPLETA SIN DIENTES - Técnica doble TC

- La prótesis del paciente o encerado diagnóstico de acrílico (sin Bario).
- La prótesis debe de disponer de 10-12 puntos de gutapercha, 6 por vestibular y 6 por lingual en diferentes posiciones.



TC1

- TC del paciente con la prótesis colocada en el maxilar.




TC2


- TC de la prótesis o encerado diagnóstico. Utilizar como base una base de espuma, Porexpan, caja de cartón, etc. (material translúcido).



ARCADA COMPLETA CON DIENTES

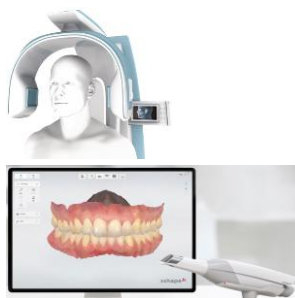

- TC del paciente sin prótesis.
- STL de la prótesis del paciente fuera de boca, oclusal y anatomía encía.

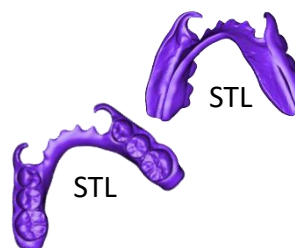

ARCADA COMPLETA CON DIENTES - Opción abrebocas




- TC del paciente sin prótesis con un abrebocas.
Maxilar superior: Lengua situada en maxilar inferior y retraída.
Maxilar inferior: Lengua situada en maxilar superior y retraída.




TC del paciente sin prótesis con un abrebocas de ortodoncia.
Maxilar superior: Lengua en mandíbula y retraída.
Maxilar inferior: Lengua situada en mandíbula y retraída



PARCIALES / MEDÍA ARCADA

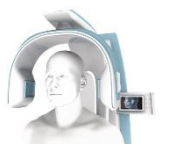

- TC del paciente sin prótesis.
- STL de la prótesis del paciente fuera de boca, oclusal y anatomía encía.

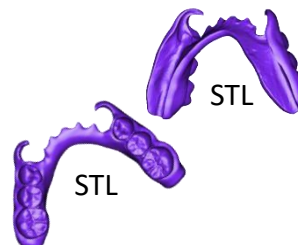

PARCIALES / MEDÍA ARCADA - Opción abrebocas



- TC del paciente sin prótesis con un abrebocas.
Maxilar superior: Lengua situada en maxilar inferior y retraída.
Maxilar inferior: Lengua situada en maxilar superior y retraída.



TC del paciente sin prótesis con un abrebocas de ortodoncia.
Maxilar superior: Lengua en mandíbula y retraída.
Maxilar inferior: Lengua situada en mandíbula y retraída

