


Implantes subperiósticos

Un equipo multidisciplinar planifica, diseña y fabrica la estructura personalizada para la realización del tratamiento con implantes subperiósticos. Su diseño individualizado maximiza la estabilidad y facilita la regeneración ósea, lo que nos aporta resultados estéticos y funcionales de forma inmediata.

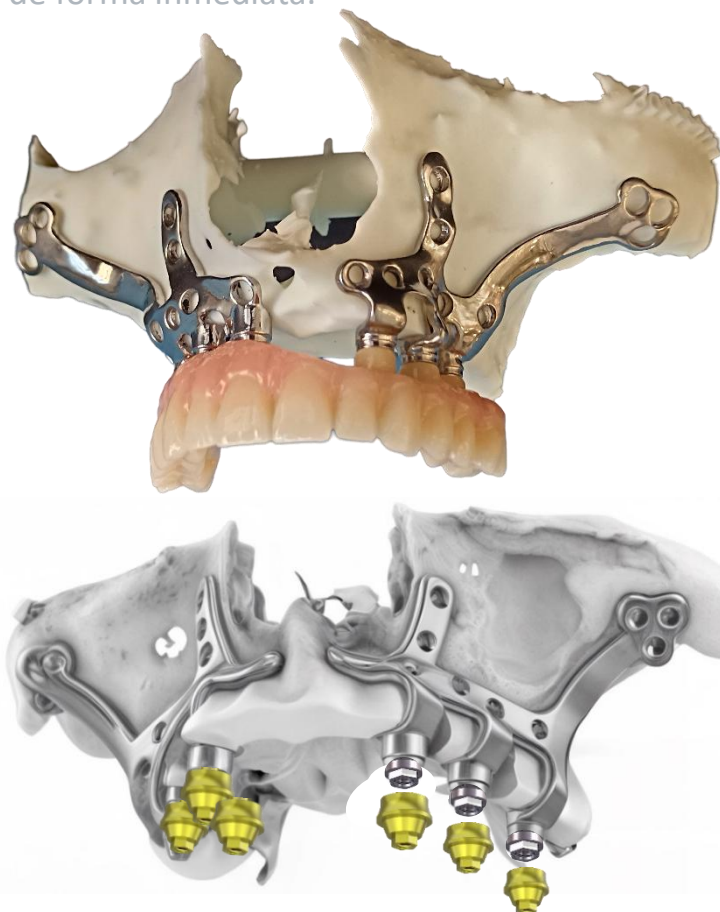


Ventajas

- Pilares Multi-Unit desmontables de diferentes alturas. Nitrurados en amarillo (PVD).
 - TC helicoidal o Cone Beam gracias a un post procesado con inteligencia artificial.
 - Estructura de Titanio Graso XXIII, sinterizado directamente por láser, SLM.
 - Grosor estructura 0,8mm.
 - Tratamientos de arcada entera con estructuras independientes por cuadrante y guía de posicionamiento.
- Amplia experiencia a nivel nacional e internacional con más de 250 tratamientos con implantes subperiósticos anuales realizados.
 - Software de planificación específico para este tipo de tratamientos (Rhino Medical).
 - Entrega de todos los instrumentos necesarios para la cirugía y asistencia de un especialista.

Con la colaboración de

KUNE
IMPLANTS


Guía de osteotomía pilotada

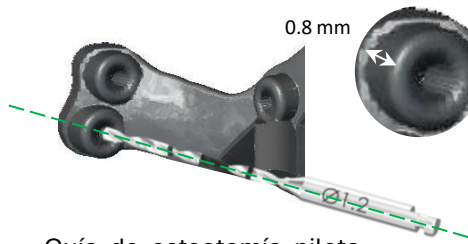

Guía de osteotomía pilota la dirección del fresado.




Tornillo de osteosíntesis se atornilla en la dirección pilotada y planificada por el ingeniero.

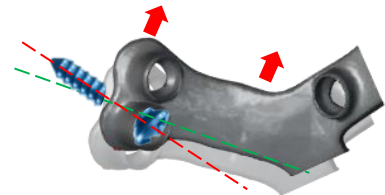


Sin fresado pilotado previo, una errónea dirección del tornillo puede provocar el desplazamiento del implante.


Guía de osteotomía con todos los tornillos de osteosíntesis

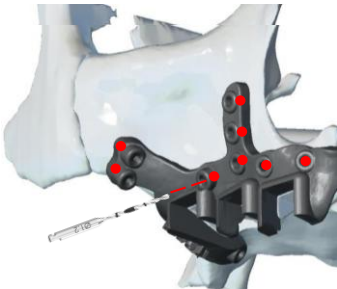

La guía permite el fresado pilotado de todos los alveolos de los tornillos de osteotomía

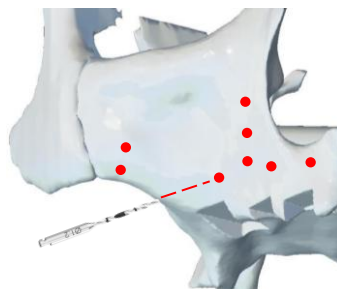

La retirada de la guía de osteotomía deja pilotados los alveolos de los tornillos de osteosíntesis.

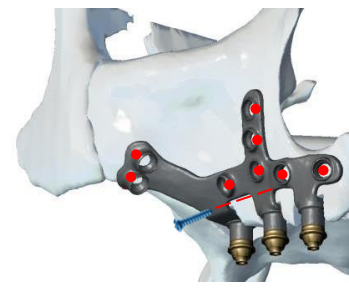

Una vez posicionado el implante quedan los alveolos pilotados centrados de cada inserción de la estructura implantológica.

Guía de verificación de la osteotomía




La guía de verificación encaja con la guía de osteotomía para verificar las correctas osteotomías de los cajones.



Flujo de trabajo fácil




Peldaño vestibular ampliado

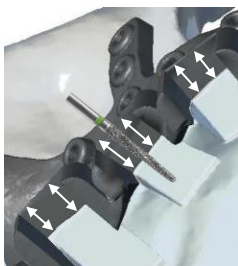

Peldaño vestibular ampliado para aportar un punto de apoyo a la fresa de osteotomía y ayudar a su correcto fresado.

Fresa de osteotomía Ø 2mm

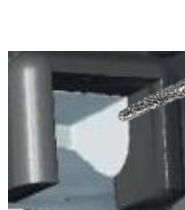

Fresa de diamante de 2.0 mm especial para corte horizontal.

Pack implantes subperiósticos

- Conversión del TC Cone Beam (clínica) o helicoidal (hospitalario).
- Diseño y planificación de las estructuras subperiósticas por ingenieros especializados en medicina craneofacial y maxilofacial.
- Realización y envío por parte de Kune Implants por e-mail del informe preliminar.
- Revisión y modificación del profesional médico en control remoto con los ingenieros de Kune.
- Finalización del diseño de las estructuras y posición de los tornillos de osteosíntesis siguiendo las sugerencias del profesional médico.
- Creación del informe final y envío por e-mail.
- Fabricación y envío de los implantes subperiósticos y guía de corte si procede.
- Envío de todo el material a la clínica.
- Asistencia a la 1ª cirugía de un técnico de Southern Implants especialista de producto.