

PROCEDIMIENTO TC TRATAMIENTO IMPLANTES SUBPERIÓSTICOS

El TC se puede realizar indiferentemente con un equipo Helicoidal (hospital) o Cone Beam (clínica).

Para poder realizar una correcta planificación de un tratamiento de implantes subperiósticos, los ingenieros necesitan ver la prótesis del paciente en el software de planificación, así como grosor de los tejidos, para asegurar unas cargas oclusales a los implantes y la visualización del grosor de los tejidos para planificar las conexiones subgingivales.

ARCADA COMPLETA SIN DIENTES

Opción 1 - Abrebocas



- TC del paciente sin prótesis con un abreboque.
Maxilar superior: Lengua situada en maxilar inferior y retraída.
Maxilar inferior: Lengua situada en maxilar superior y retraída.



Opción 2 - Técnica doble TC

- La prótesis del paciente o encerado diagnóstico de acrílico (sin Bario).
- La prótesis debe de disponer de 8 a 12 puntos de gutapercha, 4 a 6 por vestibular y 4 a 6 por lingual en diferentes posiciones.



TC1

- TC del paciente con la prótesis colocada en el maxilar en oclusión.




TC2


- TC de la prótesis o encerado diagnóstico. Utilizar como base una base de espuma, Porexpan, caja de cartón, etc. (material translúcido).

ARCADA COMPLETA CON DIENTES / PARCIAL

Opción 1

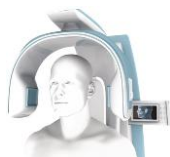

- TC del paciente sin prótesis.

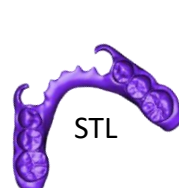


STL

STL

- STL de la prótesis del paciente fuera de boca, oclusal y anatomía encía.



Opción 2 - Abrebocas

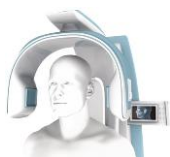

- TC del paciente sin prótesis con un abreboque.
Maxilar superior: Lengua situada en maxilar inferior y retraída.
Maxilar inferior: Lengua situada en maxilar superior y retraída.

