

ARCHIVOS DIGITALES PARA FABRICAR UN PROVISIONAL PMMA ATORNILLADO

PROTOCOLO PARA IMPLANTES SUBPERIÓSTICOS

EDÉNTULO TOTAL

i. Escáner extraoral de la prótesis (o rodete).

Escanee completamente la prótesis o rodete fuera de la boca. Registre de forma nítida tanto la superficie tisular (la que contacta con la encía) como la superficie dentaria.



Superficie dentaria + superficie tisular

ii. Escáner intraoral del registro de oclusión.

Coloque la prótesis o rodete en boca en relación con la arcada antagonista. El paciente debe cerrar en máxima intercuspidadación (MIC). Manteniendo la mordida, escanee ambos sectores laterales (premolares y molares) para registrar simultáneamente la prótesis/rodete y la arcada antagonista.



Captura bilateral del registro

iii. Escáner intraoral de la encía.

Se escanea directamente la arcada maxilar edéntula del paciente (encía).



Trayectoria de escaneado · detalle clínico

EDÉNTULO PARCIAL

i. Escáner intraoral del registro de oclusión.

Coloque la prótesis o rodete en boca en relación con la arcada antagonista y pida al paciente cerrar en MIC. Manteniendo la mordida, escanee ambos sectores laterales para registrar conjuntamente la dentición natural, la prótesis/rodete y la arcada antagonista.



Registro intermaxilar y zonas dentadas

ii. Escáner extraoral de la prótesis (o rodete).

Escanee completamente la prótesis o rodete de forma extraoral. Asegúrese de capturar con claridad la superficie tisular y la superficie dentaria.



Prótesis aislada y correctamente expuesta

iii. Escáner intraoral de la encía.

Se escanea directamente la arcada maxilar edéntula del paciente (encía).

